



Phago'wipes DADR

**Lingettes imprégnées d'une solution
désinfectante hydro-alcoolique
pour les surfaces**



Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Large spectre désinfectant
- ✓ Formule ecocertifiée
- ✓ Produit « contact alimentaire » sans rinçage

Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d'unité par carton
Boîte de 200 lingettes	460371D	10





Phago'wipes DADR

Domaine d'utilisation

- ✓ Les **Phago'wipes DADR** peuvent être utilisées pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
- ✓ Les **Phago'wipes DADR** peuvent être utilisées, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...)
- ✓ Les **Phago'wipes DADR** peuvent être également utilisées sur les jouets pour une désinfection complète.
- ✓ Les **Phago'wipes DADR** ne laissent pas de traces sur les surfaces.

Composition

- ✓ Actif désinfectant:
 - Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m
- ✓ Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité
- ✓ 99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP 4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Couleur des lingettes: bleues
- ✓ Odeur : alcool
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7
- ✓ Point éclair : 23°C

Mode d'emploi

- ✓ Les **Phago'wipes DADR** sont prêtes à l'emploi.
- ✓ Appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

Compatibilité

- ✓ Faire un essai au préalable sur plexiglass.

Précautions d'emploi

- ✓ Produit réservé à un usage professionnel
- ✓ Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

Laboratoire
phagogene®

Christeyns France – Division Santé

31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



Phago'wipes DASR

Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
<u>BACTERICIDE</u>		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	100 %	5 min.
EN 1276 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
EN 13727+A2 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	80%	5 min.
EN 13697 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
EN 16615 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	100 %	5 min.
<u>FONGICIDE</u>		
EN 1275 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 1650 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 (<i>C. albicans</i>)	80%	15 min.
EN 13624 (<i>A. brasiliensis</i>)	97%	15 min.
EN 13697 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 16615 (<i>C. albicans</i>)	100 %	5 min.
<u>VIRUCIDE</u>		
BVDV et Vaccinia virus	100 %	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100 %	5 min.

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

